

オーディオメータ AA-74 動作不具合に関するお知らせ

1. 不具合症状と原因

ブースト用気導受話器を使用し、かつ本器に内蔵される単音節語表の語音聴力検査モードにおいて、検査をスタートすると、初めに受話器から提示される10秒程度の案内音声は、検査者が操作する検査ダイヤル値から20 dBブーストされるものの、案内音声後に提示される検査語音が、本器のソフトウェアの不具合により、20 dBブーストされずに検査ダイヤル値の検査音で出力され、検査中における検査音、画面に表示される検査音のレベル値、及び検査後の印字結果は、すべて検査ダイヤル値で動作していることが分かりました。


2. 対策内容

該当製品をお使いのお客様には順次ご連絡を差し上げ、対策済みソフトウェア（ROM）へ交換させていただきます。

3. 該当製造番号（下4桁）

0009～0066、0068、0070（計60台）

AA-74 背面

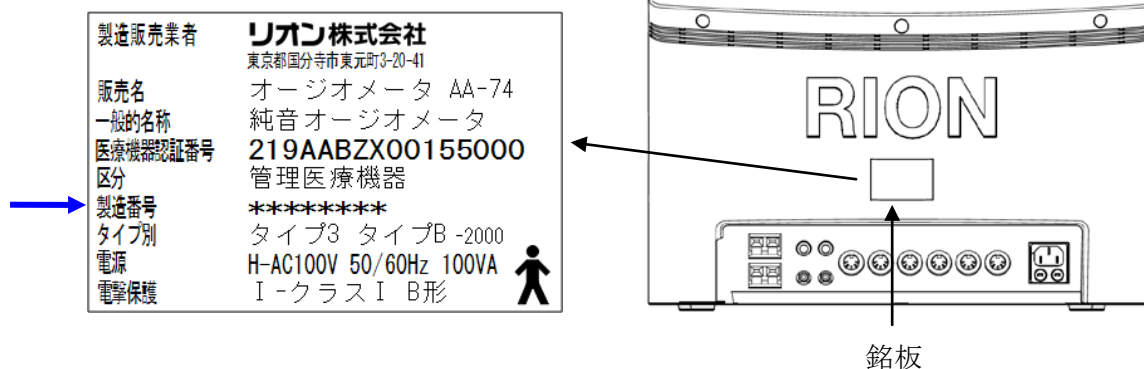

4. ご相談窓口

リオン株式会社 医療機器事業部 営業部

担当：並木 勝美

電話：042-359-7880

FAX：042-359-7441

関係情報は、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 様の回収情報でもご覧になれます。

URL：<http://www.info.pmda.go.jp/rgo/MainServlet?recallno=2-4040>