

医療機器の保守・点検記録表

医療機器販売名	オージオメータ AA-		
製造販売業社名	リオン株式会社		
製造番号		購入年月日	
施設名		設置保管場所	

種 類	点検内容	年 月 日	点検者	結 果		
使用 前 点 検	1. 外観（構造） <ul style="list-style-type: none"> ・ イヤーパッド、耳当てゴムの状態、プラグの錆び、接触不良が無いこと。 ・ コードのねじれが無いこと。 ・ 遮音カップの確認 破損、ゆるみ、バネの劣化が無いこと。 注意： イヤープッド交換の目安は、5,000人程度。 ヘッドバンド交換の目安は、15,000人程度。 2. 機能（性能） <p>電源投入後、受話器を装着し 全周波数の聴取点検を実施する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ インタラプタを操作した時、過渡音その他好ましくない音が聞こえないこと。 ・ 応答用押しボタンスイッチの動作に合わせて機器パネルが正常に表示されること。 	.	.	良・否		
		.	.	良・否		
		.	.	良・否		
		.	.	良・否		
		.	.	良・否		
		.	.	良・否		
		.	.	良・否		
		.	.	良・否		
		.	.	良・否		
		.	.	良・否		
		.	.	良・否		
		.	.	良・否		
		.	.	良・否		
		.	.	良・否		
		.	.	良・否		
		.	.	良・否		
		.	.	良・否		
		点検 校正	年に一度、専門業者に点検校正を依頼する。	.	.	良・否

修理	修理の概要・修理者名等	.	.	
----	-------------	---	---	--