医療機器の保守・点検記録表

医療機器販売名	耳管機能検査装置 JK-	
製造販売業社名	リオン株式会社	
製造番号		購入年月日
施設名		設置保管場所

種 類	点検内容	年 月 日	点検者	結果
				良・否
	1. 外観(構造)			良・否
使	・ プローブの清掃			良・否
	プローブキャップ、ステンレスチューブに			良・否
	耳あか詰まりが無いこと(取扱説明書参照)。			良・否
	・ 音響法スピーカの清掃			良・否
	スピーカ先端部に汚れが無いこと。			良・否
	・ 鼻咽腔圧検出チューブの清掃			良・否
	先端部(ポリツェル氏球先端)に汚れが			良・否
	無いこと、チューブが折れ曲がっていないこと。	• •		良・否
	・ 耳せんの洗浄	• •		良・否
用 前	耳あか詰まりが無いこと(取扱説明書参照)。			良・否
点検				良・否
	2. 機能 (性能)	• •		良・否
	電源投入後、確認を行う。			良・否
	・ プローブの耳せんを外し、先端を2mLキャビティ			良・否
	に挿しこみ、画面表示が2mLになるように、			良・否
	コンプライアンス調整を合わせる。			良・否
	・ 測定をスタートし、スピーカよりノイズ音が			良・否
	聞こえること。			良・否
		• •		良・否
				良・否
		• •		良・否
				良・否
点検 校正	年に一度、専門業者に点検校正を依頼する。			良・否

修理	修理の概要・修理者名等			
----	-------------	--	--	--