

医療機器の保守・点検記録表

医療機器販売名	耳管機能検査装置 JK-		
製造販売会社名	リオン株式会社		
製造番号		購入年月日	
施設名		設置保管場所	

種 類	点検内容	年 月 日	点検者	結 果
使用前点検	1. 外観（構造）	. .		良・否
	・ プロープの清掃	. .		良・否
	プロープキャップ、ステンレスチューブに	. .		良・否
	耳あか詰まりが無いこと（取扱説明書参照）。	. .		良・否
	・ 音響法スピーカの清掃	. .		良・否
	スピーカ先端部に汚れが無いこと。	. .		良・否
	・ 鼻咽腔圧検出チューブの清掃	. .		良・否
	先端部（ポリツェル氏球先端）に汚れが	. .		良・否
	無いこと、チューブが折れ曲がっていないこと。	. .		良・否
	・ 耳せんの洗浄	. .		良・否
	耳あか詰まりが無いこと（取扱説明書参照）。	. .		良・否
		. .		良・否
	2. 機能（性能）	. .		良・否
	電源投入後、確認を行う。	. .		良・否
	・ プロープの耳せんを外し、先端を2mLキャビティ	. .		良・否
	に挿しこみ、画面表示が2mLになるように、	. .		良・否
	コンプライアンス調整を合わせる。	. .		良・否
	・ 測定をスタートし、スピーカよりノイズ音が	. .		良・否
	聞こえること。	. .		良・否
		. .		良・否
	. .		良・否	
	. .		良・否	
点検校正	年に一度、専門業者に点検校正を依頼する。	. .		良・否

修理	修理の概要・修理者名等	. .		
----	-------------	-----	--	--